

Merkinnät ja pakkaaminen

1 Päättä haluamasi tutkimukset ja selvitä niihin sopivat näytetyypit

2 Ota näytteet oikeilla näytteenottovälineillä.

Vinkki! Ohjeista myös omistajaa, jos hän kerää näytteet itsenäisesti.

- + Käytäthän tarjoamiemme välineitä – ne on valittu toimiviksi näytteenoton lisäksi myös kuljetuksessa ja analytiikassa
- + Älä lähetä laboratorioon:
 - pusseja joita ei voi sulkea uudelleen, kiinnisolmittuja muovipusseja
 - mikroputkia (Eppendorf-putkia)
 - filmipurkkeja
 - kertakäyttöhanskoja näytepussien asemasta
 - pakasterasioita
- + Laboratorioon ei turvallisuussyistä saa lähettää ruiskuja tai neuloja, lasipurkkeja tms.

3 Merkitse näytteisiin selkeästi samat tiedot kuin lähetteelle

- + Eläimen nimi
- + Omistajan sukunimi
- + Näytteenottopäivämäärä
- + Tarvittaessa näytetyyppi ja näytteenottoaika
 - Voit käyttää samoja lyhenteitä kuin laboratoriopalvelussa
 - Näytteen tulee olla näkyvissä koko putken matkalta

4 Sulje näytteet huolellisesti

- + Älä teippaa korkkeja tai käytä parafilmiä

5 Tee lähete

- + Lähetä näytteiden mukana tulostettu lähete, jos mahdollista

6 Pussita jokaisen potilaan lähete ja siihen liittyvät näytteet omaan näytepussiinsa

- + Laita pussiin imupaperi vuotamisen varalle
- + Älä teippaa näytteitä kiinni muuhun pakkausmateriaaliin

7 Pakkaa näytepussit lähetyslaatikkoon

- + Voit laittaa samaan laatikkoon useita näytepusseja
- + Lähetä kaikki lähetteeseen liittyvät näytteet samassa laatikossa

Huom. On erittäin tärkeää että kaikki lähetteen näytteet saapuvat samana päivänä, mutta joskus (esim. kylmä- tai pakastelähetys) voi olla tarpeen lähettää näytteet eri laatikoissa. Lisää silloin kumpaankin laatikkoon huomautus että näytteitä saapuu myös toisessa laatikossa. Jos näytteet saapuvat laboratorioon eri päivinä, ne tarvitsevat erilliset läheteet.
- + Suojaa näytteet kuumuudelta ja jäätymiseltä, kääri esim. sanomalehteä näytepussien ympärille.

Vinkki! Kannattaa erotella verinäytteet aina kun mahdollista.
- + Varmista laatikon kiinni pysyminen teipillä – Yksi teippipala riittää

8 Kirjoita lähetteelle tarvittaessa lisätietoja

- + Näytteet halutaan tutkia yhteisnäytteenä (poolata)
- + Näytettä on säilytetty pakastimessa
- + Tärkeimmät tutkimukset jos näytemäärä on vajaa jne.
- + Tutkimuksen kannalta oleelliset potilastiedot, lääkitys jne.

9 Lähetä näytteet ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat ohjeet: www.idexx.fi

Näytetyyppien lyhenteitä

CP	Sitraattiplasma
EB	EDTA-kokoveri
EP	EDTA-plasma
FP	Fluoridiplasma
HB	Hepariini-kokoveri
HP	Hepariiniplasma
S	Seerumi
U	Virtsa lisäaineettomassa putkessa
UC	Virtsa viljelyyn tarkoitettussa CCM-putkessa
M	Maito lisäaineettomassa putkessa
ML	Maito lisäaineellisessa putkessa

+ CREATING CLARITY +